

Sticka Mask - Gesichtsschutz / Pflegehinweis

Schritt 1:

Trennen Sie die Polycarbonat-Scheibe vom Kopfband.

Schritt 2:

Spülen Sie die Polycarbonat-Scheibe unter fließendem lauwarmen Wasser ab und reinigen die Flächen mit haushaltsüblichem Spülmittel.



Schritt 3:

Trocknen Sie die Oberfläche mit einem Spültuch.

Schritt 4:

Legen Sie die Scheibe auf eine glatte Oberfläche.


Schritt 5:

Drücken Sie das Kopfband mit einer Hand zusammen.



Schritt 6:

Drücken Sie das Kopfband mittig auf das Klettband der Scheibe und lassen langsam los. Das Kopfband legt sich dann auf das Klettband. Durch leichtes Nachdrücken sitzt die Scheibe wieder fest.

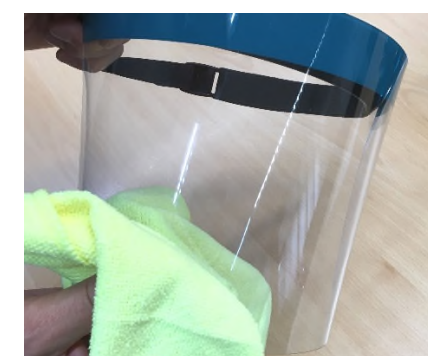

Schritt 7:

Leichte Politur mittels Mikrofasertuch.

X Keine Verwendung in der Spülmaschine.

Stammhaus Ahlen

Gersteinstraße 1-3
Industriegebiet Ost
D-59227 Ahlen
Telefon 0 23 82 / 70 19 - 0
Telefax 0 23 82 / 70 19 - 40

Gerichtsstand: 59227 Ahlen
Registergericht:
AG Münster HRB 8238
Geschäftsführer:
Wolfgang Frenz

Sparkasse Münsterland Ost
(BIC: WELADED1MST) IBAN: DE57 4005 0150 0000 0061 14

Volksbank Ahlen
(BIC: GENODEM1AHL) IBAN: DE45 4126 2501 1101 8441 00

Niederlassung Siegburg

Lindenstraße 87a
Industriegebiet Zange
D-53721 Siegburg
Telefon 0 22 41 / 5 00 98
Telefax 0 22 41 / 5 50 38